

Instalace Skyla data manager

Skyla data manager je software na způsob laboratorního informačního systému, který je určený pro přístroj Skyla Solutions.

Pro instalaci je potřeba si stáhnout soubor „skylaDataManagerSetupV2.X.2.9.exe“. Ten je dostupný na níže uvedeném odkazu:

<https://drive.google.com/drive/folders/13Wn8n3TDRsuKWk3fegg9qubQOanX4N8l?usp=sharing>

Jedná se o program navržený samotným výrobcem Skyla Solutions, z tohoto důvodu google chrome a microsoft defender nemají v databázi tento program a hlásí, že by mohl být nebezpečný. Tato hláška je generována na základě databázového systému ve kterém firma Skyla Solutions zatím není. **Program není škodlivý.**

Po zahájení stahování aplikace vám google ukáže obdobné varování




Klikněte na „Přesto stáhnout“ a soubor se začne stahovat. Po stažení aplikace jej můžete spustit.

Pokud jste dosud neměli nainstalovaný skyladatamanager, postupujte podle pokynů níže. Pokud již máte nainstalovaný, tak pouze spusťte instalaci.

Microsoft defender vám zobrazí následující varování.



Pro spuštění klikněte na „Další informace“ zobrazí se i další možnost spuštění viz následující obrázek.

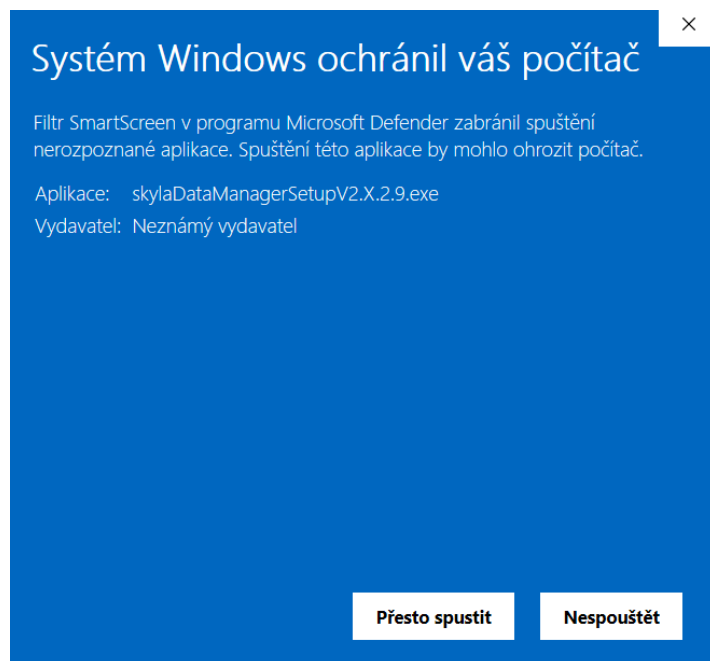

Zvolíte „přesto spustit“ a dále pokračujete klasickou instalací.

Po spuštění aplikace je potřeba provést prvotní instalaci. Tu můžete nakonfigurovat následovně podle obrázku níže:

A "First Installation" configuration window with a blue header. The title is "First Installation". Below the header, it says "Select your administrator password and basic settings". There are several fields and dropdown menus: "Username" with the value "admin", "Password" (empty), "Confirm password" (empty), "Input user login ID" with a dropdown set to "OFF", "Device type" with a dropdown set to "Veterinary Diagnos", "Language" with a dropdown set to "English", "Date format" with a dropdown set to "DD/MM/YYYY", and "Mode" with a dropdown set to "Pro". At the bottom right, there is a blue "OK" button.

Takto máte připravený software pro přijímání výsledků.

Pro ověření nejnovější verze můžete na základní obrazovce kliknout na ikonku „about“, kde se vám zobrazí aktuální verze SW (nejnovější je 2.9)

Pro další jiné dotazy kontaktujte servis.

Ing. Vojtěch Šourek

+420 720 849 067

Vojtech.sourek@medista.cz