



Skyla solutions upgrade

Stáhněte si soubor DSxx.bin vložte jej do USB disku, který bude formátován jako FAT16 nebo 32. Zjistíte to tak, že pravým tlačítkem myši si u disku zvolíte vlastnosti.


Po uložení souboru na USB disk jej vložte do přístroje a stiskněte settings.

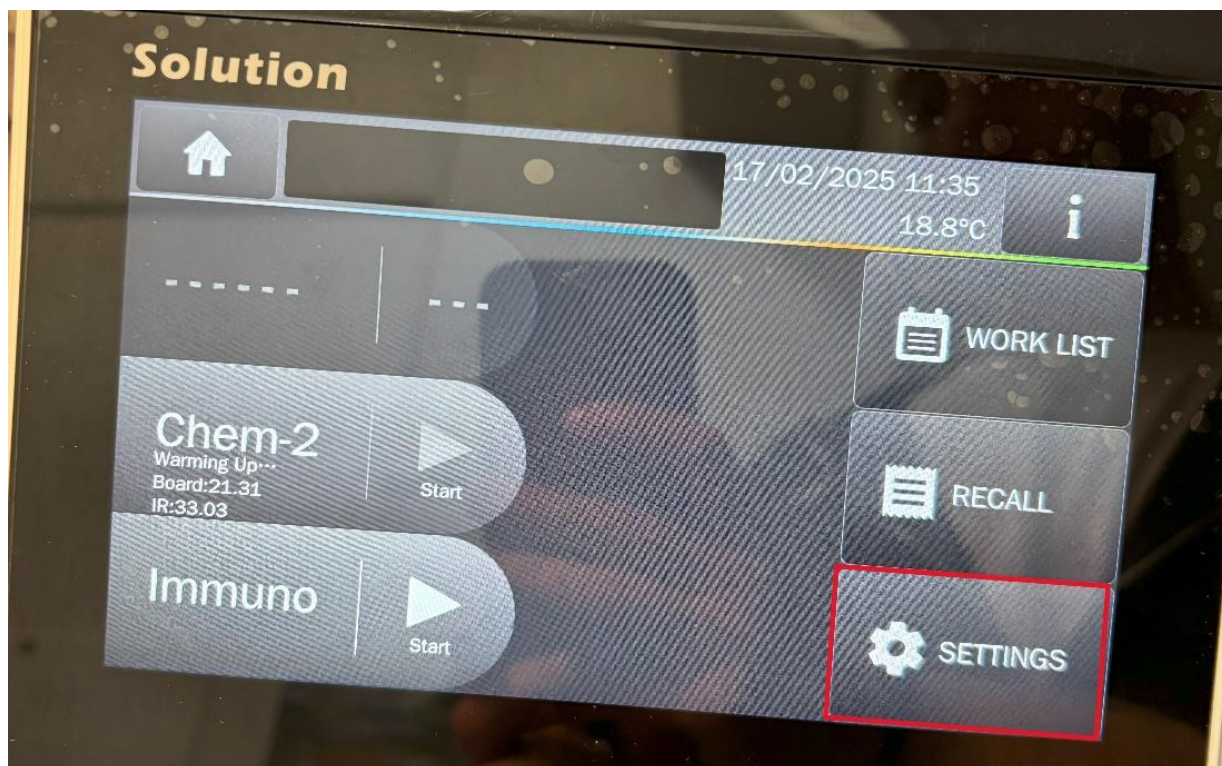


Můžete si ověřit verzi vašeho systému v **system overview**. Pokud máte starší verzi FW než je aktuální verze, tak jděte do **Administrator settings**.

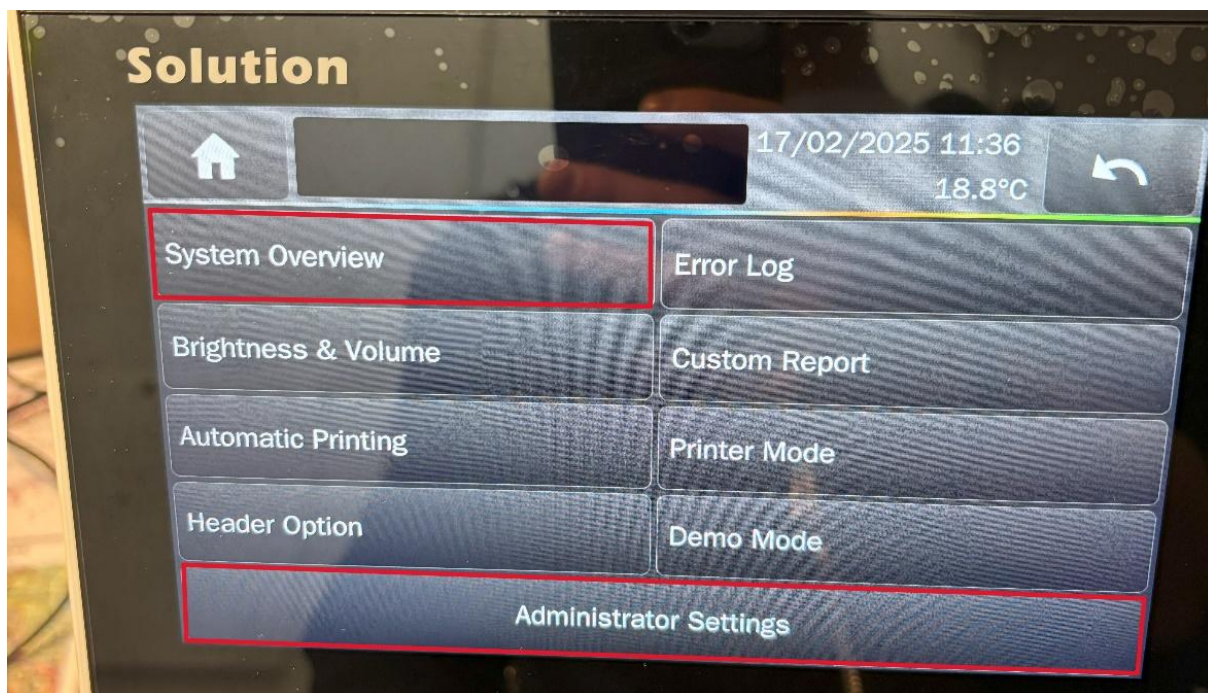

Následně zvolte systém upgrade a zvolte variantu USB. Přístroj si najde USB disk se souborem a spustí se instalace. Po skončení se přístroj restartuje a můžete si ověřit, že je nainstalován nový FW ve složce **system overview**.

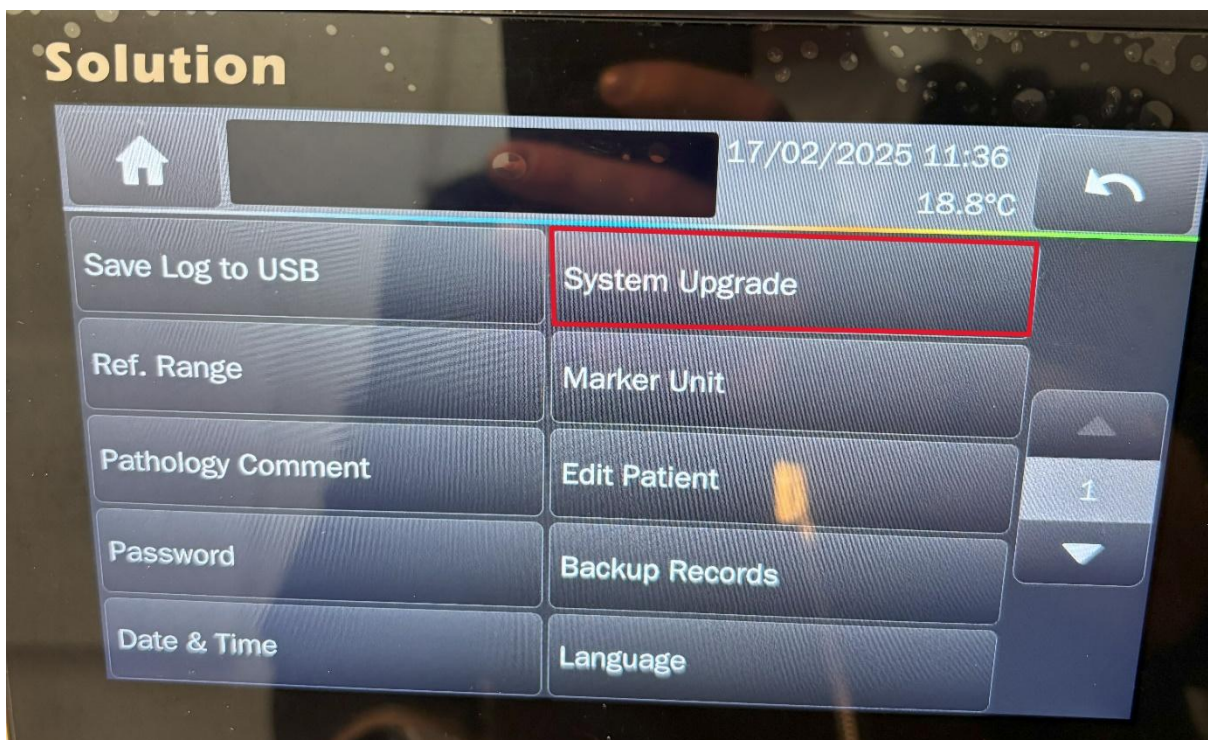

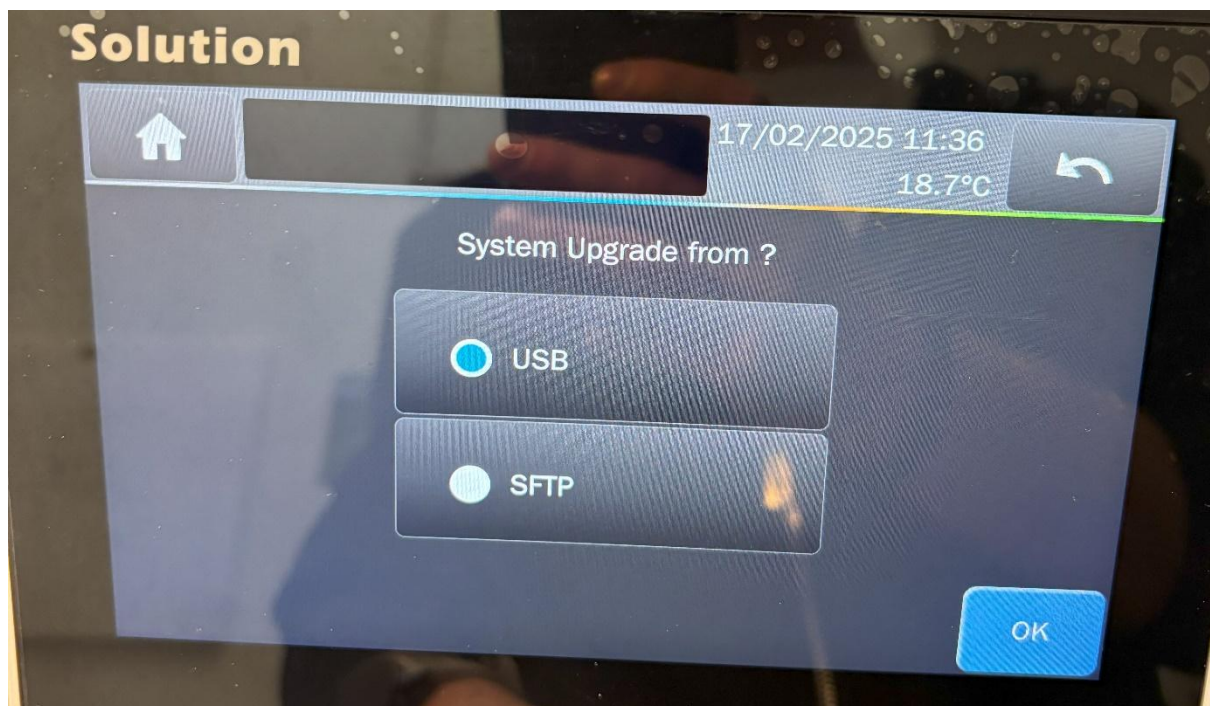

Pokud narazíte na nějaké problémy neváhejte zavolat, či napsat na servisní oddělení.

Vojtěch Šourek

Vojtech.sourek@medista.cz

+420 720 849 067